

Будь-ласка, прочитайте інструкцію перед використання

Sagami original

R&D/Sagami Rubber Ind., Co., Ltd., Japan

Увага!

1. Використовуйте тільки один презерватив у кожному статевому акті.
2. Використовуйте новий презерватив для кожного статевому акту.
3. Не торкайтеся до презерватива нігтями або іншими гострими предметами, які можуть ушкодити презерватив
4. Презервативи у випадку правильного їх використання є надійним захистом від небажаної вагітності і знижують ризик інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом, в тому числі ВІЧ.
5. Цей презерватив розроблено для вагінального сексу. Використання у інших варіантах сексу може мати підвищений ризик ушкодження презервативу
6. Презервативи Sagami дуже добре змащені і не потребують додаткового змащування. Якщо Ви або Ваш партнер бажаєте використовувати додаткове змащування, будь-ласка, проконсультуйтеся з лікарем відносно їхньої поєднання з матеріалом презерватива.

Для покупців, що купують L-розмір:

Великий розмір більше за стандартний і має бути зручний у використанні. Припиніть використання відразу ж, якщо Ви відчуєте, що презерватив надмірно великий.

Інструкція щодо використання

1. Відкрийте блістерну упаковку, потягнувши за куточок з надписом «OPEN». Будьте акуратними, щоб не ушкодити презерватив нігтями, прикрасами або іншими гострими предметами. Презерватив потрібно використовувати тільки один раз.
 2. М'яко зіжміть двома пальцями кінчик презервативу, щоб видалити повітря і залишити місце для сперми.
 3. Однією рукою покладіть згорнутий презерватив на голівці ерегovanого пенісу.
 4. Іншою рукою розгорніть презерватив до основи пенісу. Надягайте презерватив на пеніс до початку статевому акту і слідкуйте за тим, щоб він залишався на пенісі до повного закінчення статевому акту.
 5. Після еякуляції вилучіть статевий член, поки він знаходиться в стані ерекції, притримуйте презерватив, щоб він не зіскочив
 6. Ніколи не викидайте використаний презерватив в каналізацію, щоб не нашкодити зовнішньому середовищу.
-

Зберігання

1. Будь-ласка, притримуйтеся наступних вимог зберігання:
 - а) не можна зберігати під прямими сонячними променями
 - б) не зберігайте презервативи біля легко випарних медикаментів або інших хімічних сполук

2. Зберігайте презервативи в упаковці. Не можна перевозити презервативи без упаковки

7 Переваг презервативів Sagami Original 0.02

1. Ультратонкий

Це один із найтонших презервативів у світі – вони у 2 рази тонші за звичайні латексні

2. Ультраміцний

Міцність цих презервативів у 2 рази вища в тестах на розтяг і в 3 рази вища в тестах на об'ємний розтяг

3. Найкращий за теплопровідністю

Теплопровідність набагато вища за латексні. Тепло передається так, неначе презервативу немає

4. Не має специфічного запаху

Презервативи не містять протеїнів, тому не мають специфічного «латексного» запаху

5. Надають натуральні відчуття

Молекули поліуретану мають високу щільність, тому поверхня презервативу виключно гладенька і надає натуральні відчуття

6. Гіпоалергенність

Відсутність протеїнів і хімічних подразнюючих сполук виключає можливість алергічних реакцій

Найменування: Sagami Original

Упаковка: 2 ультратонких поліуретанових презервативи

Презервативи, що не містять латексу зі змащенням

Найпопулярніші презервативи № 1 у Японії

Характеристики Sagami Original 0.02

1. Найтонші за структурою – 20 мікрон, в 3 рази вища міцність на об'ємний розтяг (Стандарт торгівельної марки Sagami)
2. Неперевершена теплопровідність, тепло передається так, неначе презервативу немає
3. Гладенька поверхня створює натуральні відчуття
4. Поліуретан – найбільш біосумісна з людським організмом речовина, тому мінімальний ризик алергічних реакцій на відміну від латексу
5. Не містять протеїнів, тому відсутній специфічний «латексний» запах

Кожний презерватив вироблений та індивідуально тестований на надійність у відповідності зі стандартом Японії. Ні один із методів контрацепції не може на 100 % гарантувати захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом або попередити вагітність.

Однак якщо дотримуватися інструкції, що вкладена в упаковку, можна максимально знизити ризик.

Головний офіс: Сагамі Раббер Індастріз Ко Лтд., Японія

Адреси заводів: Сагамі Мануфактурес, Малазія; Сагамі Раббер Індістріз Ко Лтд., Японія

Імпортер: ТОВ «Фарм Лінк», Україна

Термін придатності:

Серія